

XIQUE

KULUTTAJAKÄYTTÖÖN
FÖR KONSUMENT ANVÄNDNING

KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYKSENSUOJAIN

ENGÅNGSANDNINGSSKYDD

Kertakäyttöinen hengityksensuojain korvalenkeillä, malli LK-Z006
Engångsandningsskydd med öronband, modell LK-Z006

CE 0370

Huom.:
Vaihda hengityksensuojain uuteen, jos sinulla on hengitysvaikeuksia tai koet olosi epämuokavaksi, jos hengityksensuojain on saastunut eritteistä tai vieraista aineista, jos koet lisääntynyttä hengitysvastusta tai jos hengityksensuojain on vaurioitunut.

Obs:
Byt genast ut andningsskyddet mot ett nytt om det känns svårt eller obekvämt att andas, om andningsskyddet är kontaminerat med blod eller främmande ämnen, om du upplever ett ökat andningsmotstånd eller om andningsskyddet har tagit skada.

10 kpl | 10 st.

CE EN 149:2001+A1:2009 -standardi
CE EN 149:2001+A1:2009 -standard



FFP2 NR
TASO | NIVÅ

Box width
and height

13cm


Box depth
7,5cm

THREE-DIMENSIONAL
EFFICIENT PROTECTION
EAR-BAND FOLDING ANTI-PARTICULATE MASK



REF	LK-Z006
LOT	

Käyttöohjeet / Bruksanvisning

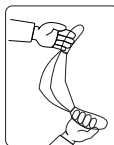


Peukälidet hirtin ja aava hengityksensuojain.
Taka händerna och öppna andningsskyddet.



Puhdista korvat, korvat ja hampaat.
Torka händer, munnen och näsan.



Aseta lenkit korvien taakse.
Pää böjden bakom öronen.

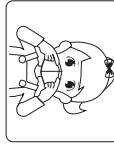

Muuttele muidenmi käsin tihisti korvoja vasten.
Pressa det ner mot näsborren med båda händerna.

Käytön jälkeen poista hengityksensuojain kasvosta puhdistettuna käsin tarttumalla sen nauhoihin. Älä koske hengityksensuojaimen ilmaputkeen. Laita kertakäyttöinen hengityksensuojain rokkain käyttöön jälle. Fose ad desinholi kaadet hengityksensuojaimen postinamen jälkeen. Eite amandning, la tort andningsskyddet med rengjorda händer genom att ta tag i öronbanden. Rör inte vid skyddets utlösa. Släng engångsskyddet i soporna efter användning. Tvätta eller desinficera händerna efter att du har tagit bort andningsskyddet.

Maahanuonti ja markkinointi
Med Medi Oy, Yhtymäntie 22, 00740 Helsinki
info@medimed.fi | +358405913927



Kertakäyttöinen hengityksensuojain korvalenkeillä, malli LK-Z006
Engångsandningsskydd med öronband, modell LK-Z006

Tuotteen nimi: Xique FFP2 NR -hengityksensuojain. Ei steriili.
Käyttö: Hengityksensuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu kertakäyttöön.
Umpu ja sörmpu kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välkerros suodatusta tekstiileistä.


Produktnamn: Xique FFP2 NR-andningsskydd. Ej sterilt.
Beskrivning: Andningsskyddet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkat av norrvenn-tyg och mellnlagret av smältbäst tyg.
Typ av andningsskydd: Andningsskydd för engångsbruk.
Kvantitet: 10 st./förpackning.
Måttangge standard: (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009, FFP2.
Tillverkningsdatum: Se datum på förpackning.
Förpackningsstämning: Tre är från tillverkningsdatumet.
Användning: Produkten är avsedd att bäras för att skydda allmänheten mot mikroorganismer och små partiklar. Endast för engångsbruk. Ej sterilt.

Varoitus:
1. Tuotetta ei tule käyttää ympäristössä, jossa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta, eikä vedenalaisessa ympäristössä.
2. Älä käytä hengityksensuojaimen käyttöä ei postia tartuntatauti.
3. Hengityksensuojaimen käyttö voi johtaa tartuntatauti.
4. Käyttöohjeiden vastainen käyttö voi johtaa sairauten.
5. Käytä tuote kosken vooden sille valmistusohjeita.
6. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.
7. Materiaalit voivat aiheuttaa allergisen reaktion.

Huomaa:
1. Tarkista hengityksensuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaa vauriota, öljytahjoja tai hajuja.
2. Jos koet hengenhäiriöitä, humpaus tai muita epämuokavuuksia, poista saastuneesta alueesta välittömästi.
3. Vaihda hengityksensuojain heti tuoreen, että hengittäminen on vaikeaa.

Säilytys:
1. Varsinkin aseenmuksaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella.
2. Vältä mekaanista rasitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, aurinnoparistetta ja kosketusta kemikaaleihin.
3. Säilytys -20 -38 °C:n lämpötilassa suljetuissa astioissa, aurinnoparistetta ja kosketusta kemikaaleihin.
3. Viitekommentit: Suositellaan kosteuden ollessa < 80 %.

Tillverkare: Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd. Address: Qingcao Industrial Park, Tongcheng, Anhui Province, 6971044 293822, Väinhietu Kinassa.
Anhalt organ: LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), NB 0370, Testatu ja CE-tillverkusstandardin EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti. Sertifikaatin numero: 0370-5639-PPF/B.
EU-forskan om överensstämmelse och bruksanvisning:
http://medimed.fi/hengityksensuojaimet/
Säljya tämä käyttöohje

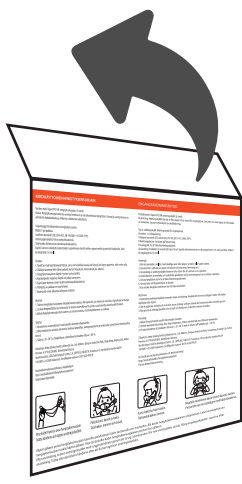






Fold flap like this

Foldable flap
30mm

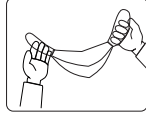Front side
135mm

Back side
135mm

KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYKSENSUOJAIN	ENGÅNGSANDNINGSSKYDD		
<p>Tuotteen nimi: Xique FFP2 NR -hengityksensuojain. Ei steriili.</p> <p>Kuvaus: Hengityksensuojain koostuu useasta kerroksesta ja on tarkoitettu kertakäyttöön. Ulompi ja sisempi kerros on valmistettu kuitukankaasta ja välikerros sulateista teksteleistä.</p> <p>Suojaintyyppi: Kertakäyttöinen hengityksensuojain.</p> <p>Määrä: 1 kpl/pakkaus.</p> <p>Sovellettu standardi: (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009, FFP2.</p> <p>Valmistuspäivämäärä: Katso tuotepakkauksesta.</p> <p>Säilytysaika: Kolme vuotta valmistuspäivämäärästä.</p> <p>Käyttö: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi suojelemaan väestöä mikro-organismeilta ja pieniltä hiukkasilta. Vain kertakäyttöön. Ei steriili.</p> <p>Varoitus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tuotetta ei tule käyttää ympäristössä, jossa on haitallisia kaasuja tai höyryjä tai hapen puutetta, eikä veden alla. Älä käytä avoimen liekin läheisyydessä (kuten hitsauksen, muovaamisen jne. aikana). Hengityksensuojaimen käyttö ei poista tartuntariskiä. Käyttäjien vastainen käyttö voi johtaa sairauten. Käytä tuote kolmen vuoden sisällä valmistuspäivämäärästä. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut. Materiaalit voivat aiheuttaa allergisen reaktion. <p>Huomaa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tarkista hengityksensuojaimen ulkonäkö ennen käyttöä. Älä käytä sitä, jos huomaat vaurioita, olijaharja tai hajua. Jos koet hengähdystusta, huimausta tai muuta epämieluisuutta, poista saastuneelta alueelta välittömästi. Vaihda hengityksensuojain heti uuteen, jos sinusta tuntuu, että hengittäminen on vaikeaa. <p>Säilytys:</p> <ol style="list-style-type: none"> Varastoitava asiamukaisesti saastuneiden alueiden ulkopuolella. Vältä mekaanista rasitusta, kosteutta, korkeaa lämpötilaa, aurinkosäteilyä ja kosketusta syövyttävien kemikaalien kanssa. Säilytys -20-38 °C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa < 80 %. <p>Valmistaja: Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd. Address: Qingcao Industrial Park, Tongcheng, Anqing City, Anhui Province. 6 971044 293892. Valmistettu Kiinassa.</p> <p>Ilmoittava laboratorio: IGA Technological Center, S.A. (APPLUS), NB 0370. Testattu ja CE-hyväksytty standardin EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti. Sertifikaatin numero: 0370-5639-PPE/B</p> <p>Vaatimustenmukaisuusdeklaration ja käyttöohjeet: http://medicalfinland.fi/hengityksensuojaimet/ Säilytä tämä käyttöohje</p>	<p>Produktnamn: Xique FFP2 NR-andningskydd. Ej sterilt.</p> <p>Beskrivning: Andningskyddet består av flera lager och är avsett för engångsbruk. Det yttre och inre lagret är tillverkade av nonwoven-tyg och mellanlagret av smältplast.</p> <p>Typ av andningskydd: Andningskydd för engångsbruk.</p> <p>Kvantitet: 1 st./förpackning.</p> <p>Tillämpad standard: (EU) 2016/425, EN 149:2001+A1:2009, FFP2.</p> <p>Tillverkningsdatum: Se datum på förpackning.</p> <p>Förvaringstid: Tre år från tillverkningsdatumet.</p> <p>Användning: Produkten är avsedd att bäras för att skydda allmänheten mot mikroorganismer och små partiklar. Endast för engångsbruk. Ej sterilt.</p> <p>Varningar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bör inte användas i miljöer med skadliga gaser eller ångor, syrebrist eller under vatten. Använd inte i närheten av öppen eld (såsom vid svetsning, formning osv.). Användning av andningskydd eliminerar inte risken för att smittas av en sjukdom. Underlämnethet att använda och underhålla produkten enligt anvisningarna kan resultera i sjukdom. Använd produkten inom tre år från tillverkningsdatumet. Använd inte om förpackningen är skadad. Kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga användare. <p>Observera:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrollera andningskyddets utseende innan användning. Använd det inte om du lägger märke till skador, ojeffektier eller lukter. Om du upplever andnöd och yrsel eller annat obehag, vänligen lämna det kontaminerade området genast. Byt genast ut andningskyddet mot ett nytt om du känner att det blir svårare att andas. <p>Förvaring:</p> <ol style="list-style-type: none"> Måste förvaras korrekt utanför förorenade områden. Undvik mekanisk belastning, fukt, hög temperatur, solen och kontakt med frätande kemikalier. Vi rekommenderar att produkten förvaras i -20-38 °C med en relativ luftfuktighet på < 80 %. <p>Tillverkare: Anhui Lekang Sanitary Materials Co., Ltd. Address: Qingcao Industrial Park, Tongcheng, Anqing City, Anhui Province. 6 971044 293892. Valmistettu Kiinassa.</p> <p>Anmälat organ: IGA Technological Center, S.A. (APPLUS), NB 0370. Testattu ja CE-hyväksytty standardin EN 149:2001+A1:2009 mukaisesti. Sertifikaatin numero: 0370-5639-PPE/B</p> <p>EU-försäkran om överensstämmelse och bruksanvisning: http://medicalfinland.fi/hengityksensuojaimet/ Förvara denna bruksanvisning</p>		
 <p>Pese kädet hyvin ja avaa hengityksensuojain. Tvätta händerna och öppna andningskyddet.</p>	 <p>Peitä kasvot, korvat ja leuka. Täck hakan, munnen och näsan.</p>	 <p>Aseta lenkit korvien taakse. Trä banden bakom öronen</p>	 <p>Muotoile molemmin käsin tiiviisti kasvoja vasten. Pressa tätt ner mot näsbågen med båda händerna.</p>
<p>Käytön jälkeen poista hengityksensuojain kasvoilta puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoihin. Älä koske hengityksensuojaimen ulkopintaan. Laita kertakäyttöinen hengityksensuojain roskiin käytön jälkeen. Pese tai desinfioi kädet hengityksensuojaimen poistamisen jälkeen.</p> <p>Efter användning, ta bort andningskyddet med rengjorda händer genom att ta tag i öronbanden. Rör inte vid skyddets utsida. Släng engångsnyddet i soporna efter användning. Tvätta eller desinficera händerna efter att du har tagit bort andningskyddet.</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LOT</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">LK-Z006</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">REF</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div> </div>			
			
<p>ENGÅNGSANDNINGSSKYDD</p> <p>KERTAKÄYTTÖINEN HENGITYKSENSUOJAIN</p>			

Width
135mm

THIS IS THE INDIVIDUAL MASK WRAPPING